

Hinweise zur Probennahme

Sie können wahlweise Blut- oder Haarproben einschicken.

Blutproben Für die Untersuchung benötigen wir ca. 2 ml EDTA-Blut. Der Tierarzt verfügt in der Regel über entsprechende EDTA-Röhrchen. Nach der Blutabnahme das Röhrchen gut schütteln und mit der Lebensnummer des Tieres (ggf. mit Namen und Geburtsdatum) beschriften. Wenn Sie die Probe nicht sofort verschicken, muss sie im Kühlschrank gelagert werden. Für den Versand sind Kühlakkus o.ä. aber nicht erforderlich. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Probe nicht übers Wochenende auf dem Postweg unterwegs ist. Bitte achten Sie auf sichere Verpackung im Polsterumschlag.

Haarproben Für die Untersuchung benötigen wir etwa 30 Mähnen- oder Schweifhaare mit Haarwurzeln. Es können nur ausgerupfte Haare untersucht werden; ausgekämmte oder abgeschnittene Haare sind für die Untersuchung unbrauchbar. Bitte verpacken Sie die Haare möglichst trocken (Proben mit Schimmelbefall können nicht analysiert werden) und ohne Verunreinigungen in die dafür vorgesehenen Probetütchen und versehen Sie sie mit der Lebensnummer des Tieres (ggf. mit Namen und Geburtsdatum).

Probenbehälter dann mit dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Auftragsformular an folgende Adresse schicken:

Certagen GmbH
Pferdeabstammung
Marie-Curie-Str. 1
D-53359 Rheinbach
Deutschland

Für Rückfragen stehen wir unter +49 (0)2226-871600 gerne zur Verfügung.